


ကိုယ်တိုင် Swab ယူရန်နည်းလမ်း

QUIDEL QUICKVUE အင်တီဂျင်အမြန်စမ်းသပ်မှု



မလုပ်ပါနှင့်၊ အကယ်၍

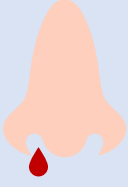

လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီက နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်း



လွန်ခဲ့သော ၄ ပတ်က နှာခေါင်းခွံစိပ်ထားဖူးခြင်း




လွန်ခဲ့သော ၈ ပတ်ခန့် က မျက်နှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖူးခြင်း

Swab ယူရန်နည်းလမ်း

1 ကျေးဇူးပြု၍ စမ်းသပ်မှုမစမီ လက်များကို ဆေးပါ။



2 ဓါတ်ဆေးရည်ပါသော ပြွန်ချောင်း၏ အဖုံးကို ဖွင့်ပြီး ပြွန်ချောင်းထည့်သော ခွက်တွင် ထည့်ပါ။

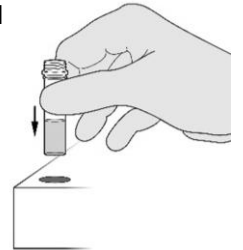

3 Swab နှာခေါင်းတုတ်တံကို ၎င်း၏ အထုပ်အတွင်းမှ ဖွင့်၍ ထုတ်ယူပါ။


Swab တုတ်တံထိပ်ကို မကိုင်ရ။




4 Swab တုတ်တံကို နှာခေါင်းပေါက်တစ်ခုစီအတွင်း (၁.၅ စင်တီမီတာမှ ၂ စင်တီမီတာ) ရောက်အောင် အသာထိုးထည့်ပြီး နှာခေါင်းအတွင်း၌ ၄ ခါ လှည့်ပါ။ နှာခေါင်းအတွင်း၌ ၁၅ စက္ကန့်ခန့်ထားပါ။




5 ဓါတ်ဆေးရည်ပါသော ပြွန်ချောင်း၏ အဖုံးကို ဖွင့်ပြီး Swab တုတ်တံကို ၎င်းအထဲ အောက်ခြေရောက်အောင် ချက်ချင်းထိုးထည့်၍ Swab တုတ်တံကို ၃-၄ ကြိမ် မြှော့ပါ။

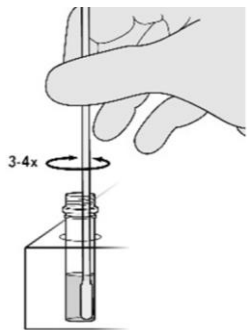

6 Swab တုတ်တံကို ပြွန်ချောင်းထဲ၌ အနည်းဆုံး ၁ မိနစ်ထားပါ။

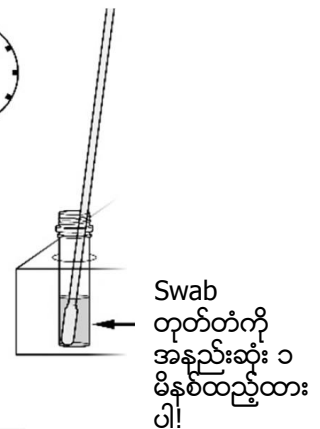

7 Swab တုတ်တံထိပ်ကို ပြွန်ချောင်းနှံရံဖြင့် ပွတ်၍ Swab တုတ်တံမှ ဓါတ်ဆေးရည်ရနိုင်သမျှ ရအောင် ညှစ်ပေးပါ။ Swab တုတ်တံထိပ်ကို မကိုင်ရ။ Swab တုတ်တံကို အကုန်အစွဲ ရယ်ကင်းအိတ်ထဲ ထည့်ပါ။

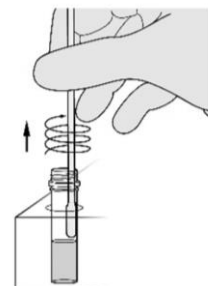


ကိုယ်တိုင် Swab ယူရန်နည်းလမ်း

QUIDEL QUICKVUE အင်တီဂျင်အမြန်စမ်းသပ်မှု

Swab ယူရန်နည်းလမ်း

8 စမ်းသပ်မှုကပ်ပြားကိုပိတ်ထားသော အထုပ်အပေါ်ရှိ ရှိ ဆုတ် ရမည့် အမှတ်မှသတ်ဖြင့် ဆုတ် ဖြေ၍ ထုတ်ယူပါ။ စမ်းသပ်မှု ကပ်ပြားကို ထိပ်ဖက်မှသာ ကိုင်ပါ။

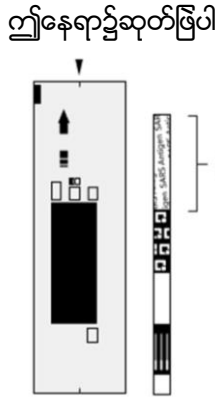


9 စမ်းသပ်မှုကပ်ပြားကို ဓါတ်ဆေး ရည်ပါသော အဖုံးကို ဖွင့် ထားသည့် ပြွန်ချောင်းထဲသို့ များတို့ကို ဧအာက်စိုက်ပြီး ထည့်ပါ။

စမ်းသပ်မှုကပ်ပြားကို အနည်းဆုံး ၁၀ မိနစ် ထည့်ထားပါ။




10 အချိန် ၁၀ မိနစ် စောင့်ပြီး ကပ်ပြားပေါ်မှ အဖြေကို စစ်ပါ။

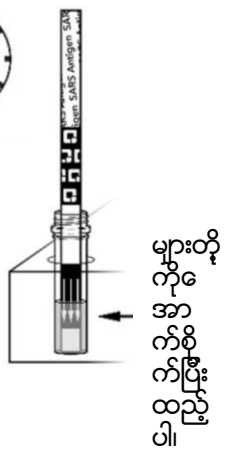

11 ကပ်ပြားကို ပြွန်ချောင်းထဲမှ ထုတ်ပြီး အဖြေကို ရှိမိနစ်အတွင်း မှန်ကန်အောင် ဖတ်ပါ။ ကပ်ပြားကို ညီညာပြေပြစ် သော နေရာတွင် တချိန်လုံး ထားပါ။


ရောဂါရှိသည်ဟု အဖြေ

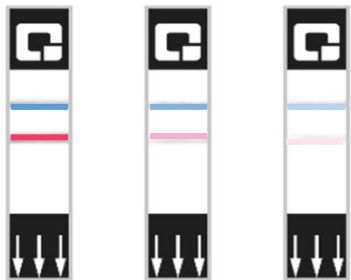

ရောဂါမရှိဟု အဖြေ



အဖြေထုတ်၍ မရ

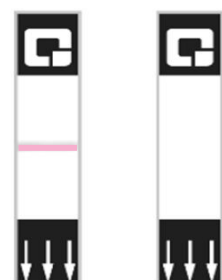

- Test နေရာ၌ ပန်းရောင်မှ အနီလိုင်းနှင့် Control နေရာ၌ နဂိုအတိုင်း အပြာလိုင်း ပေါ်နေပါက ရောဂါရှိသည်ဟု အဖြေထွက်သည်။

- Control နေရာ၌ သာ နဂိုအတိုင်း အပြာလိုင်းပေါ်နေပါက ရောဂါမရှိဟု အဖြေထွက်သည်။
- Control နေရာ၌ နဂိုအတိုင်း အပြာလိုင်းမပေါ်ဘဲ Test နေရာ၌ ပန်းရောင်မှ အနီလိုင်းပေါ်နေခြင်း သို့မဟုတ် နောက်ခံအရောင်ကမထင်ရှားဘဲ အဖြေကို ဖတ်လိုမရပါက အဖြေထုတ်၍ မရပါ။ စမ်းသပ်မှုအထုပ်အသစ်ဖြင့် ပြန်လုပ်ပါ။



စမ်းသပ်မှုအဖြေမှာ ရောဂါရှိသည် သို့မဟုတ် အဖြေမထွက်ပါက ရောဂါရှိမရှိ ဆက်လက်ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုစမ်းသပ်ရန် ဆေးကုသမှုခံယူပါ။

12 စမ်းသပ်မှုပြီးပါက လက်များကို ဆေးပါ။

