


INSTRUKSI SWAB MANDIRI

UNTUK RAPID TEST ANTIGEN SD BIOSENSOR



JANGAN DILANJUTKAN JIKA:

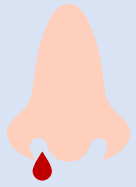

Mimisan dalam
24 jam terakhir



Operasi hidung
dalam 4 minggu
terakhir



Cedera wajah
dalam 8 minggu
terakhir

PROSEDUR SWAB

- 1 Harap bersihkan tangan Anda sebelum memulai tes.



- 2 Sebelum memulai tes, harap keluarkan satu swab stick, satu alat test, dan satu tabung buffer ekstraksi yang tersegel dan tutup nozzle. Keluarkan alat tes dari kemasannya.



- 3 Keluarkan swab stick dari kemasan.



- 4 Masukkan swab stick ke dalam lubang hidung (~2cm) sambil diputar perlahan. Selama berada di dalam lubang hidung, putar stick 10 kali.
2,0 cm



- 5 Ulangi ke dalam lubang hidung lainnya dengan swab yang sama.



- 6 Lepaskan segel dari tabung buffer ekstraksi lalu masukkan swab ke dalam tabung buffer ekstraksi untuk dicampur. Sambil menekan tabung buffer, aduk swab 10 kali.



- 7 Tekan tabung reagen saat menarik swab.




- 8 Tekan penutup nozzle dengan erat ke tabung.



- 9 Gunakan jari Anda untuk mengetuk sisi tabung secara perlahan. Ini membantu mencampur larutan.



- 10 Letakkan 4 tetes ke lubang sampel pada test cartridge.

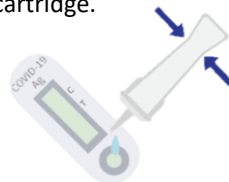

- 11 Tunggu selama 15 menit sebelum mengecek hasilnya di test cartridge. Letakkan cartridge di permukaan yang rata sambil menunggu.



- 12 Baca hasilnya pada test cartridge. **Jika Anda melihat adanya garis di kedua posisi "C" dan "T", ini menunjukkan hasil tes positif. Harap mencari pertolongan medis untuk evaluasi lebih lanjut dan tes konfirmasi.**

Jika Anda melihat adanya garis hanya pada posisi "C", ini menunjukkan hasil test negatif.

Jika Anda melihat adanya garis hanya pada posisi "T", maka hasil tes invalid. Harap ulangi test dengan menggunakan alat tes lainnya.

- 13 Buang swab stick, tabung reagen, dan test cartridge yang sudah dipakai ke dalam kantong sampah medis.




- 14 Bersihkan tangan Anda setelah tes.




POSITIF



NEGATIF

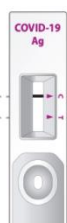

INVALID

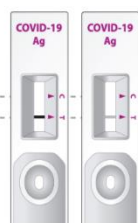

"C" Control Line
"T" Test Line