


คำแนะนำในการทดสอบด้วยตนเอง

สำหรับการทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วของ
เอสดี ไบโอเซ็นเซอร์



อย่าดำเนินการทดสอบหาก

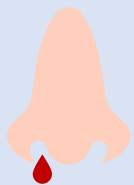

มีเลือดกำเดาไหลใน
24 ชั่วโมงที่ผ่านมา



มีการผ่าตัดจมูก
ในช่วง 4 สัปดาห์ที่
ผ่านมา



มีอาการบาดเจ็บที่
ใบหน้าในช่วง 8
สัปดาห์ที่ผ่านมา

ขั้นตอนในการทดสอบ

1

กรุณาทำความสะอาดมือก่อนเริ่ม
การทดสอบ



2

ก่อนเริ่มการทดสอบโปรดนำไม้สำลี
หนึ่งอันอุปกรณ์ทดสอบหนึ่งชุด
หลอดสกัดน้ำยาหนึ่งหลอดและฝา
ครอบหัวฉีดหนึ่งอัน นำอุปกรณ์
ทดสอบออกจากบรรจุภัณฑ์



3

นำไม้สำลีออกจาก
บรรจุภัณฑ์




4

สอดไม้สำลีเข้าไปในรูจมูกใน
ขณะที่หมุนเบา ๆ หมุนวนไม้ 10
ครั้งขณะอยู่ในรูจมูก



5

ใช้ไม้อันเดียวกันทำซ้ำ
กับรูจมูกอีกข้างหนึ่ง

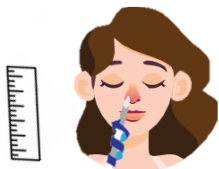


6

แกะฝีก่อออกจากหลอด
น้ำยาสกัดและสอดไม้
สำลีลงในหลอดน้ำยา
สกัดเพื่อให้ผสมกัน
ขณะบีบหลอดน้ำยาให้
คนไม้สำลี 10 ครั้ง



7

บีบหลอด
สกัดรวม
กับสำลีที่
ปลายไม้

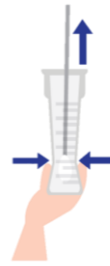

8

กดฝัครอบ
หัวฉีดเข้ากับ
หลอดให้
แน่น



9

ใช้นิ้วเคาะเบา ๆ
ที่ข้าง ๆ ของ
หลอดเพื่อผสม
สารละลาย



10


ใส่สารละลาย 4 หยด
ลงในบ่อตัวอย่างบน
ดรัมทดสอบ



11

กรณารอ 15 นาทีก่อนตรวจสอบผล
อยู่บนดรัม โปรดให้ดรัมวางอยู่บน
พื้นผิวเรียบตลอดระยะเวลา

15 นาที

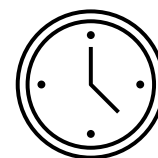

12

อ่านผลลัพธ์บนดรัมทดสอบ
หากคุณเห็นเส้นปรากฏขึ้น
ทั้งที่ตำแหน่งตัวอักษร "C"
และ "T" แสดงว่าผลการ
ทดสอบในเชิงบวก โปรดไป
พบแพทย์เพื่อรับการประเมิน
และการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน

หากคุณเห็นเส้นปรากฏขึ้นที่
ตำแหน่งตัวอักษร "C" เท่านั้น
แสดงว่าผลการทดสอบเชิงลบ

หากคุณเห็นเส้นปรากฏขึ้นที่ตำแหน่ง
ตัวอักษร "T" เท่านั้น แสดงว่าการ
ทดสอบไม่ถูกต้อง โปรดทำการ
ทดสอบซ้ำกับชุดทดสอบอื่น

13

ทั้งไม้สำลี หลอดน้ำยา
และดรัมทดสอบที่ใช้
แล้วทั้งหมดลงในถุง
ปลอดภัย




14


ทำความสะอาดมือหลัง
การทดสอบ




เชิงบวก

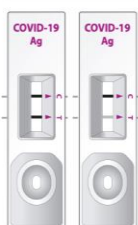

เชิงลบ

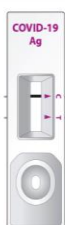

ไม่ถูกต้อง

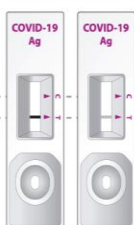

"C" Control Line
"T" Test Line