


# INSTRUKSI SWAB MANDIRI

## UNTUK RAPID TEST ANTIGEN QUIDEL QUICKVUE



### JANGAN DILANJUTKAN JIKA:

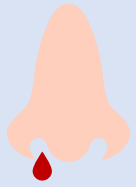

Mimisan dalam  
**24 jam terakhir**



Operasi hidung  
dalam **4 minggu**  
terakhir




Cedera di wajah  
dalam **8 minggu**  
terakhir

## PROSEDUR SWAB


- 1** Harap bersihkan tangan Anda sebelum memulai tes.




- 2** Buka tutup tube yang telah berisi cairan lalu letakkan dalam tube holder.

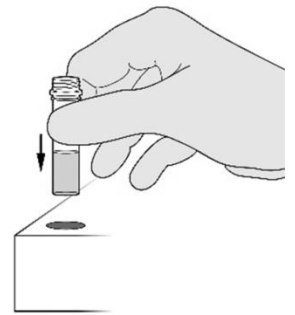


- 3** Buka kemasan alat swab hidung.

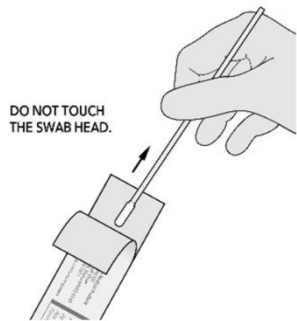


- 4** Masukkan alat swab ke rongga hidung (~1,5cm - 2cm). Usapkan swab di sekeliling dinding setiap rongga hidung setidaknya 4 kali. Ambillah sampel selama 15 detik.

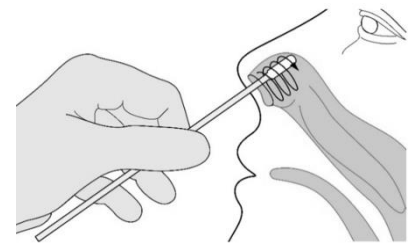


- 5** Segera masukkan alat swab ke dalam tube terbuka yang telah berisi cairan hingga menyentuh dasar tube. **Aduk atau putar alat swab 3 atau 4 kali.**

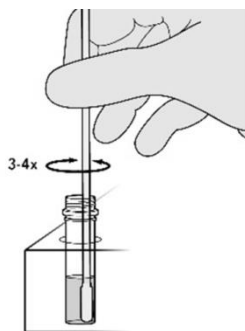

- 6** Biarkan alat swab berada dalam tube setidaknya selama **1 menit.**

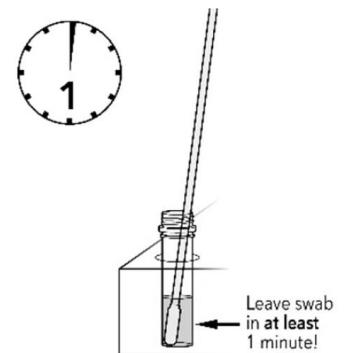

- 7** Usap ujung alat swab ke dinding tube untuk memeras cairan sebanyak mungkin saat mengeluarkan alat swab. Jangan sentuh ujung alat swab. Buang alat swab ke dalam kantong sampah medis.

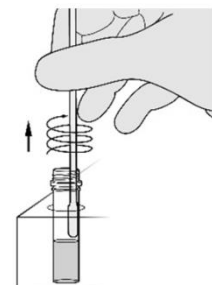


# INSTRUKSI SWAB MANDIRI

## UNTUK RAPID TEST ANTIGEN QUIDEL QUICKVUE

### PROSEDUR SWAB

- 8 Siapkan test strip dengan membuka kantong strip pada tanda sobek. Buka test strip dengan hati-hati dan **hanya pegang bagian atas stripnya saja.**

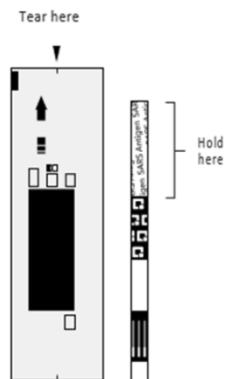


- 9 Masukkan test strip ke tube terbuka yang telah berisi cairan, dengan panah ke arah bawah.




Leave strip in at least 10 minutes!

- 10 Tunggu selama 10 menit sebelum mengecek hasilnya di test strip.

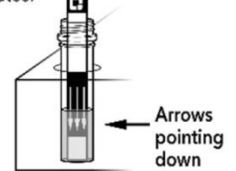

- 11 Test strip harus dibaca dalam 5 menit setelah dibuka dari tube yang telah berisi cairan untuk menghindari hasil tidak akurat. Selama ini, harap letakkan test strip di permukaan yang rata.

#### Hasil positif

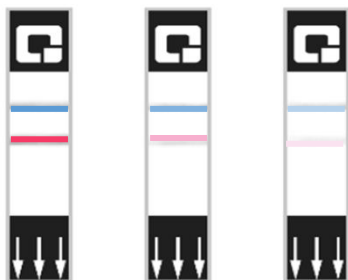

#### Hasil negatif



#### Hasil invalid



- Penampakan adanya SALAH SATU warna pink hingga kemerahan pada Test Line DAN prosedural Control Line warna biru menunjukkan **hasil tes nya positif.**
- Penampakan HANYA prosedural Control Line warna biru menunjukkan **hasil tes nya negatif.**
- Jika Control line warna biru tidak muncul meskipun adanya salah satu warna pink hingga kemerahan pada Test Line ATAU jika warna latar belakang tidak jelas dan mengganggu proses pembacaan tes, maka **hasil tes invalid.** Harap ulangi tes dengan menggunakan alat tes yang lain.



Jika diuji positif atau tidak benar sebanyak dua kali,

Silahkan ke dokter untuk pemeriksaan medis lebih lanjut dan konfirmasi pengujian.

- 12 Bersihkan tangan Anda setelah tes.

