


自助拭子检测仪用法说明

QUIDEL QUICKVUE抗原快速检测



如果发生以下情况，请勿继续进行检测：

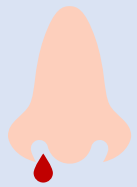

过去的**24小时**，
鼻腔出血



过去的**4个星期**，
动过鼻腔手术




过去**8个星期**，
脸部受过伤

拭子检测程序


- 1** 开始进行检测前请先把手洗干净。




- 2** 把一支预先充满的试管管盖移开并把它放回试管夹里。

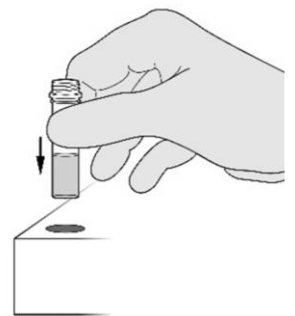


- 3** 撕开鼻腔拭子的包装纸。

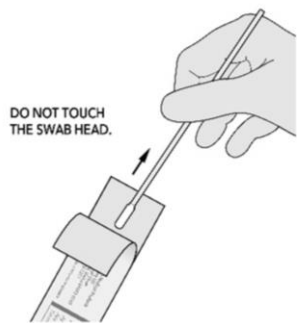


- 4** 把拭子放进鼻孔 (~1.5 到 2公分)。然后将它在每个鼻腔内壁四周摩擦至少**4次**，以便采集样本，为时**15秒**。

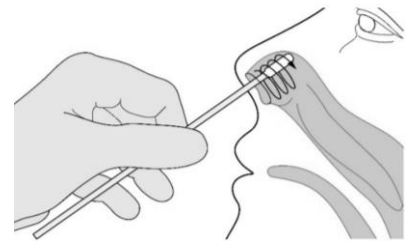


- 5** 立刻把拭子放进已打开的预先充满的试管直至试管底部。将拭子搅拌或打旋**3、4次**。

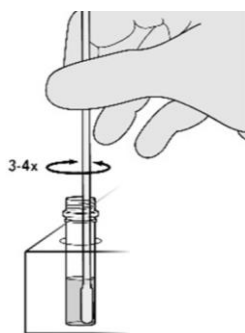

- 6** 让拭子留在试管里至少**1分钟**。

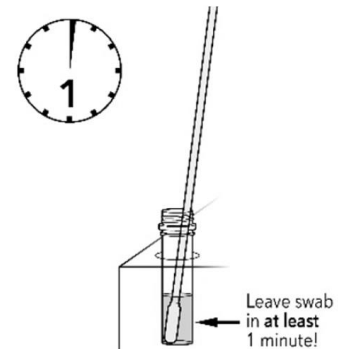

- 7** 把拭子顶端在试管臂上擦一擦以便在抽出拭子时尽量把其中液体挤压出来。不要触碰拭子顶端。把拭子丢进破坏环境物品专用垃圾袋。

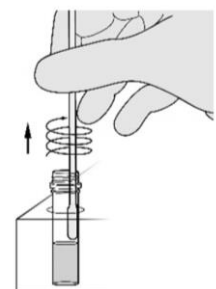


自助拭子检测仪用法说明

QUIDEL QUICKVUE抗原快速检测

拭子检测程序


8 请在试条小袋上的“在此撕开”处撕开小袋并**只握住试条的上端**小心地把试条取出以进行准备工作。

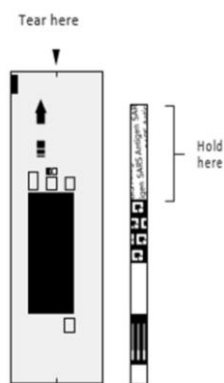

9 把试条放进已打开的预先充满的试管，箭头指向下方。




Leave strip in at least 10 minutes!

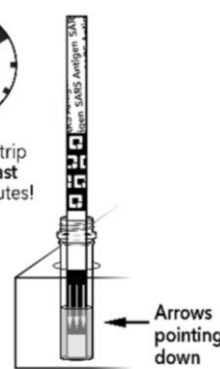

10 检查试条上的结果之前先等10分钟。

11 把试条从预先充满的试管中取出后必须在5分钟内阅读以防不准确效果。在这段时间里请把试条放置在平面上。


阳性

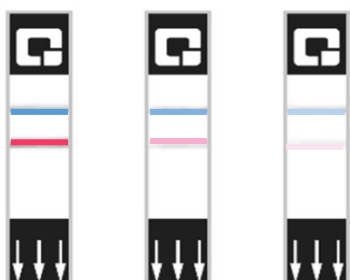

阴性



无效

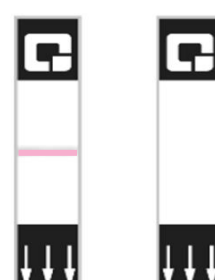

- 若是有些微粉红至红色检测线和一条蓝色程序控制线出现，表示**检测结果是阳性**。

- 只有一条蓝色程序控制线出现则表示**检测结果是阴性**。

- 即使有些微粉红至红色试线出现或是背景颜色不清且干扰到检测结果的阅读，但若是蓝色控制线没出现，则表示**结果无效**。请利用另一检测配套重复检测。

! 若检测结果是阳性或两次无效，请立刻求医并进行进一步评估及确定性检测。

12 检测后把手洗干净。

