


নিজে সোয়াব পরীক্ষা করার নির্দেশাবলী

এসডি বায়োসেন্সর অ্যান্টিজেন র‍্যাপিড পরীক্ষার জন্য



নিজে সোয়াব টেস্ট করবেন না যদি:

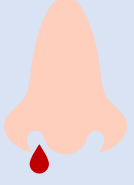

গত ২৪ ঘন্টায়
আপনার নাক থেকে
রক্ত পড়ে থাকে



গত ৪ সপ্তাহে
আপনার নাকের কোন
অন্ত্রোপচার (সার্জারি)
হয়ে থাকে



গত ৮ সপ্তাহে
আপনার মুখে
কোনও আঘাত
লেগে থাকে

সোয়াব পরীক্ষার পদ্ধতি

1

পরীক্ষা শুরু করার
আগে দয়া করে
আপনার হাত পরিষ্কার
করে নিন।



2

পরীক্ষা শুরুর আগে, দয়া করে একটি
সোয়াব স্টিক, একটি পরীক্ষার যন্ত্র,
একটি সীল করা নিষ্কাশন বাফার টিউব
এবং একটি নজল ক্যাপ বের করুন।
পরীক্ষার যন্ত্রটিকে এর প্যাকেজিং থেকে
বের করুন।



3

প্যাকেজ থেকে সোয়াব
স্টিক বের করুন



4

সোয়াব স্টিকটি নাকের ছিদ্রের ভিতরে
ঢোকানোর সময় ধীরে ধীরে ঘুরান।
সোয়াব স্টিকটি নাকের ছিদ্রের মধ্যে
থাকা অবস্থায় ১০ বার ঘুরান।

২.০ সেমি



5


একই সোয়াব স্টিক নাকের
অন্য ছিদ্রে ঢুকিয়ে পদ্ধতিটি
পুনরায় করুন।

২.০ সেমি



6

নিষ্কাশন বাফার টিউব থেকে
সীল খুলে ফেলুন
এবং মিশ্রণের জন্য সোয়াবটি
নিষ্কাশন বাফার টিউবের
মধ্যে ঢোকান। বাফার
টিউবটি চাপার সময়
সোয়াবটি ১০ বার নাড়ুন।

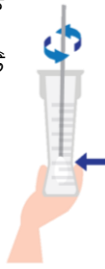

7

সোয়াব
নিষ্কাশনের
সময়
বিকারক
(রিএজেন্ট)
টিউবটি
চাপুন।



8

টিউবের উপরে
নজলের ক্যাপটি
শক্তভাবে
চাপুন।




9

টিউবের পাশে
কয়েকবার আলতো
করে চাপতে আপনার
আঙুল ব্যবহার
করুন। এটি দ্রবণটি
(সলুশনটি) মিশ্রিত
করতে সাহায্য করবে।



10

পরীক্ষার জন্য রাখা
কার্তুজের নমুনার পাত্রে
উপরে ৪ ফোটা দিন।

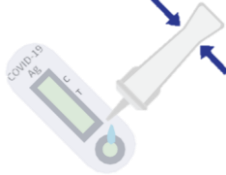

11

টেস্ট কার্তুজে ফলাফল চেক করার আগে
১৫ মিনিটের জন্য অপেক্ষা করুন। দয়া
করে এই সময়ে কার্তুজটি একটি সমতল
পৃষ্ঠের উপর রাখুন।

১৫ মিনিটের



12

টেস্ট কার্তুজে ফলাফল
পড়ুন। আপনি যদি "C" এবং "T"
উভয় অবস্থানেই একটি লাইন
দেখতে পান তবে এটি পরীক্ষার
ফলাফল পজিটিভ হয়েছে তার
ইঙ্গিত দেয়।
আরও মূল্যায়ন এবং
নিশ্চিতকরণমূলক পরীক্ষার জন্য
দয়া করে ডাক্তারের সাহায্য নিন।

আপনি যদি একটি লাইন কেবল "C"
অবস্থানে দেখতে পান, তাহলে এটি একটি
নেগেটিভ ফলাফলের ইঙ্গিত দেয়।

আপনি যদি কেবল "T" অবস্থানে একটি লাইন
দেখতে পান, তাহলে আপনার পরীক্ষার
ফলাফল অকার্যকর হয়েছে। দয়া করে
পরীক্ষাটি আবার অন্য টেস্ট কিটে করুন।

13

সমস্ত ব্যবহৃত সোয়াব
স্টিক, রিএজেন্ট টিউব এবং
টেস্ট কার্তুজ
বায়োহাজার্ড ব্যাগে
ফেলুন।




14

পরীক্ষার পরে
আপনার হাত
পরিষ্কার করুন।



পজিটিভ

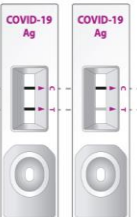

নেগেটিভ



অকার্যকর



"C" Control Line
"T" Test Line