


Arahan-arahan Kesat Sendiri

Untuk Ujian Cepat Antigen SD Biosensor



JANGAN TERUSKAN SEKIRANYA:

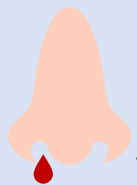

Hidung berdarah dalam masa 24 jam yang lalu



Hidung dibedah dalam masa 4 minggu yang lalu



Cedera di muka dalam masa 8 minggu yang lalu

ATURAN CARA MENGESAT

1 Sila cuci tangan anda sebelum memulakan ujian.



2 Sebelum memulakan ujian, sila keluarkan sebatang lidi pengesat, satu alat ujian, satu tiub penampun perahan yang belum dibuka dan satu penutup muncung. Keluarkan alat ujian dari pembungkusannya.



3 Keluarkan lidi pengesat dari bungkusan.



4 Tusukkan lidi pengesat ke dalam lubang hidung sambil memutarkannya dengan perlahan. Putarkan lidi itu 10 kali semasa ia berada dalam lubang hidung.

2.0 cm



5 Lakukan yang sama pada lubang hidung yang satu lagi dengan pengesat yang sama.


2.0 cm



6 Buka balutan di tiub penampun perahan dan tusukkan pengesat ke dalam tiub penampun perahan untuk membancuhnya. Sambil mengapit tiub penampun, putarkan pengesat sebanyak 10 kali.



7 Apit tiub reagent semasa memerah pengesat tersebut.

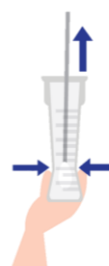


8 Tekan penutup muncung dengan ketat pada tiub tersebut.



9 Gunakan jari anda untuk menepuk dengan lembut pada tepi tiub tersebut beberapa kali. Ini akan membancuh larutan tersebut.




10 Letakkan 4 titisan di liang sampel kartrij ujian.

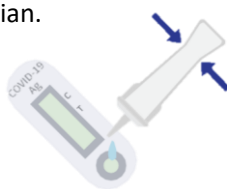

11 Tunggu sehingga 15 minit sebelum memeriksa keputusan pada kartrij ujian tersebut. Sila pastikan kartrij tersebut diletakkan atas permukaan yang rata semasa tempoh ini.

15 mins

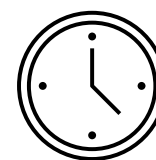

12 Baca keputusan pada kartrij ujian tersebut. **Jika anda nampak satu garisan muncul di kedua-dua kedudukan "C" dan "T", ini menandakan keputusan ujian yang positif. Sila dapatkan rawatan perubatan dengan segera untuk penilaian selanjutnya dan ujian pengesahan.**

Jika anda nampak satu garisan muncul di kedudukan "C" sahaja, ini menandakan keputusan ujian negatif.

Jika anda nampak satu garisan muncul hanya di kedudukan "T", keputusan ujian itu tidak sah. Sila ulang semula ujian menggunakan kelengkapan ujian yang lain.

13 Buang semua lidi pengesat yang terpakai, tiub 'reagent' dan kartrij ujian ke dalam beg biobahaya.




14 Cuci tangan anda selepas ujian tersebut.




POSITIF



NEGATIF

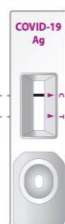

TIDAK SAH

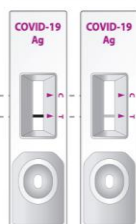

"C" Control Line
"T" Test Line