


自助拭子检测仪用法说明

SD Biosensor抗原快速检测 (ART)



如果发生以下情况，请勿继续进行检测：

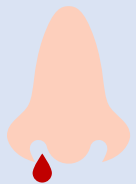

过去的**24小时**，
鼻腔出血



过去的**4个星期**，
动过鼻腔手术



过去**8个星期**，
脸部受过伤

拭子检测程序

- 1** 检测之前，请把双手洗干净。



- 2** 测试之前，请取出一条拭子条、一个测试仪、一个密封抽取缓冲管和一个喷嘴盖。从包装盒中取出测试仪器。



- 3** 从包装盒中取出拭子条。




- 4** 把拭子条插入鼻孔(~2公分)，轻轻地旋转，拭子条插在鼻孔内时，请快速转动10次。




- 5** 用同一条拭子，为另一个鼻孔，重复作同样的检测。



- 6** 把密封抽取缓冲管的封条拿掉，把拭子插入抽取缓冲管进行混合。当您挤压缓冲管时，将拭子搅动**10次**。

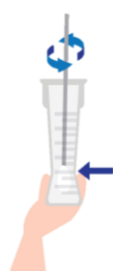

- 7** 抽取拭子条时，请挤压一下试剂管。

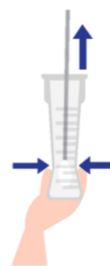


- 8** 管子上的喷嘴盖压紧。



- 9** 用您的手指轻敲管子的旁边数次，使溶液混合均匀。




- 10** 把**4滴**溶液倒入检测盒的样本容器内。

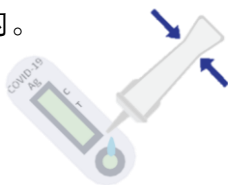

- 11** 等待**15分钟**，然后检查测试盒上所显示的结果，在这段时间内，请将测试盒放在平坦的表面上。

15分钟

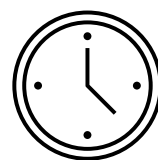

- 12** 读取测试盒上显示的检测结果。**如果您看到一条线出现在“C”和“T”这两个位置，这显示测试结果呈阳性，请找医护人员进一步评估、验证和确认这项测试。**

如果您看到一条线只是出现在“C”的位置，这检测结果呈阴性。

如果您看到一条线只是出现在“T”的位置上，表示这项测试无效，请使用另一套测试器重新测试一次。


- 13** 把所有用过的拭子条、试剂管和测试盒，丢进生物危害品袋子。




- 14** 测试过后，请把双手洗干净。




阳性

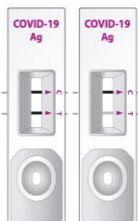

阴性

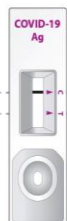

无效

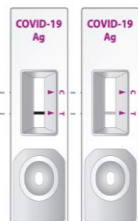

* C Control Line
* T Test Line