


# ARAHAN PENGESATAN SENDIRI

## UNTUK UJIAN CEPAT ANTIGEN QUIDEL QUICKVUE



### JANGAN TERUSKAN JIKA:

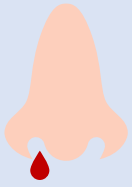

Hidung berdarah dalam masa **24 jam** yang lepas



Hidung dibedah dalam masa **4 minggu** yang lepas




Cedera di muka dalam masa **8 minggu** yang lepas

## TATACARA MENGESAT

- 1** Sila cuci tangan anda sebelum memulakan ujian tersebut.




- 2** Buka penutup dari satu tiub yang telah terisi dan letak balik dalam pemegang tiub.

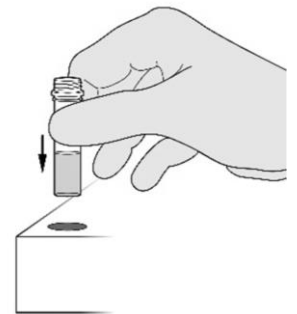


- 3** Buka pembungkus daripada pengesat hidung.


Jangan sentuh pucuk pengesat.

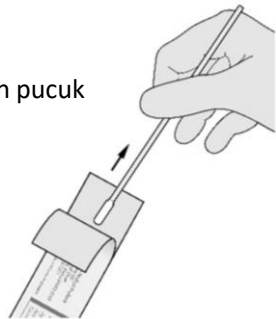

- 4** Jolok pengesat ke dalam lubang hidung (~1.5sm hingga 2sm). Geselkan pengesat sekitar bahagian dinding dalam setiap lubang hidung sekurang-kurangnya 4 kali. Ambil 15 saat untuk mengumpul sampel.

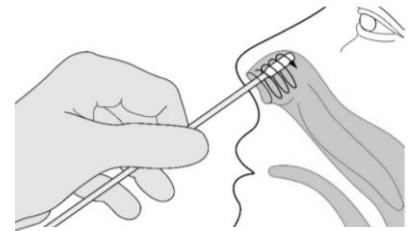

- 5** Dengan segera letakkan pengesat ke dalam tiub terbuka yang telah terisi, sehingga menyentuh bahagian dasar tiub tersebut. **Gerakkan atau putarkan pengesat 3 atau 4 kali.**

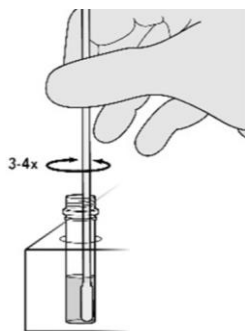


- 6** Tinggalkan pengesat dalam tiub untuk **sekurang-kurangnya satu minit.**



Tinggalkan pengesat di dalam untuk sekurang-kurangnya 1 minit!

- 7** Geselkan pucuk pengesat pada bahagian dinding tiub untuk memicit keluar sebanyak mungkin cecair ketika memerah pengesat tersebut. Jangan sentuh pucuk pengesat tersebut. **Buang pengesat ke dalam beg biobahaya.**

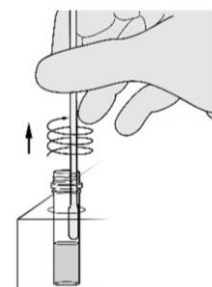


# ARAHAN PENGESATAN SENDIRI

## UNTUK UJIAN CEPAT ANTIGEN QUIDEL QUICKVUE

### TATACARA MENGESAT

- 8 Sediakan jalur uji dengan membuka kantung jalur di bahagian yang bertanda koyakkan di sini. Alihkan jalur uji tersebut dengan hati-hati dan **hanya pegang bahagian atas jalur tersebut.**

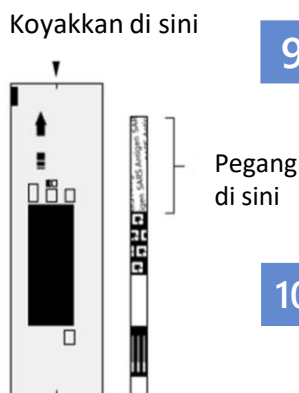


- 9 Letakkan jalur uji ke dalam tiub terbuka yang telah terisi dengan anak panahnya menuding ke bawah.

Tinggalkan jalur di dalam untuk sekurang-kurangnya 10 minit!




- 10 Tunggu sehingga 10 minit sebelum memeriksa keputusan pada jalur uji tersebut.

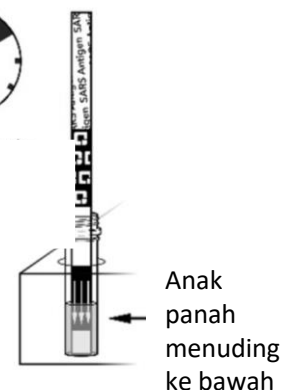

- 11 Jalur uji tersebut mesti dibaca dalam masa 5 minit setelah dialihkan daripada tiub yang telah terisi untuk mengelakkan keputusan yang tidak tepat. Sila simpan jalur uji tersebut di atas permukaan yang rata semasa tempoh ini.

#### Keputusan positif

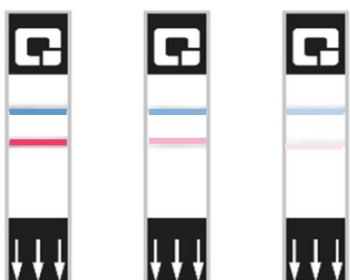


- Kemunculan SEBARANG Garis Uji warna merah jambu hingga merah DAN kemunculan Garis Kawal prosedur warna biru menandakan **keputusan ujian yang positif.**

#### Keputusan negatif



- Kemunculan HANYA Garis Kawal prosedur warna biru menandakan **keputusan ujian yang negatif.**
- Jika Garis Kawal warna biru tidak muncul sekalipun jika sebarang Garis Uji warna merah jambu hingga merah muncul ATAU jika warna latar belakang tidak menjadi jernih dan mengganggu pembacaan ujian tersebut, **keputusannya tidak sah.** Sila ulang semula ujian tersebut dengan menggunakan alat uji yang lain.

#### Keputusan tidak sah

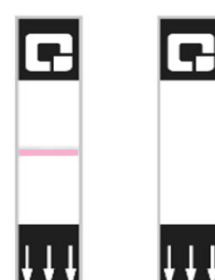

- 12 Cuci tangan anda selepas ujian tersebut.



**Jika keputusan ujian positif atau tidak sah untuk kali kedua, segera dapatkan bantuan perubatan bagi penilaian selanjutnya dan ujian pengesahan.**