


# 自助拭子检测仪用法说明

## Abbot Panbio抗原快速检测 (ART)



如果发生以下情况，请勿继续进行检测：

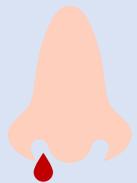

过去的**24小时**，  
鼻腔出血



过去的**4个星期**，  
动过鼻腔手术



过去**8个星期**，  
脸部受过伤

## 拭子检测程序

1

检测之前，请把双手洗干净。




2

测试之前，请取出一条拭子条、一个测试仪、一个缓冲瓶和一个提取管。从包装盒中取出测试仪。



3

把缓冲瓶的盖子打开，垂直地握着缓冲瓶，同时把缓冲液倒入提取管，直到缓冲液到达规定的填充线。

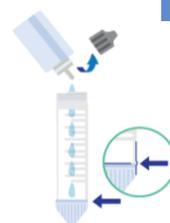

4

从包装盒中取出拭子条。



5

把拭子条插入鼻孔，轻轻地旋转，将拭子条转动5次。

2.0公分



6

用同一条拭子，为另一个鼻孔，重复作同样的检测。

2.0公分




7

把浸在缓冲液中的拭子尖端，沿着提取管的管壁转动至少5次。




8

抽取拭子条时，请挤压一下试剂管。

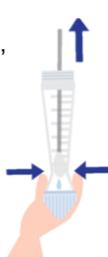

9

在断点的位置折断拭子条，把拭子条留在管内，然后盖紧提取管的盖子。

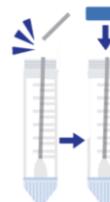

10

用您的手指轻敲管子的旁边数次，使溶液混合均匀。




11

打开位于提取管底部的喷嘴盖。



12

挤出5滴的溶液，滴入测试仪的检样井内，完成之后，把喷嘴盖关上。

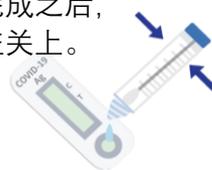

13

等待15分钟，然后检查测试盒上所显示的结果，在这段时间内，请将测试盒放在平坦的表面上。

15分钟



14

读取测试盒上显示的检测结果。**如果您看到一条线出现在“C”和“T”这两个位置，这显示测试结果呈阳性，请找医护人员进一步评估、验证和确认这项测试。**

**如果您看到一条线只是出现在“C”的位置，这检测结果呈阴性。**

**如果您看到一条线只是出现在“T”的位置上，表示这项测试无效，请使用另一套测试器重新测试一次。**

15

把所有用过的拭子条、试剂管和测试盒，丢进生物危害品袋子。




16

测试过后，请把双手洗干净。



阳性

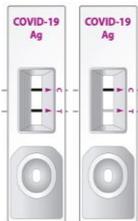

阴性



无效



\* C Control Line  
\* T Test Line