


# ကိုယ်တိုင် Swab ယူရန်နည်းလမ်းများ

Abbot Panbio Rapid Antigen စမ်းသပ်မှုအတွက်



မလုပ်ပါနှင့်၊ အကယ်၍ -

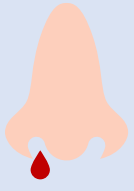

သင်လွန်ခဲ့သော ၂၄နာရီ ကနာခေါင်းသွေးယိုခဲ့ပါက



လွန်ခဲ့သော ၄ပတ်က နာခေါင်းခွံစိပ်ထားဖူးပါက



လွန်ခဲ့သော ၈ပတ်ခန့်က မျက်နှာတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရဖူးပါက

## Swab ယူနည်း

- စမ်းသပ်မှုမစမီ လက်များကို ဆေးပါ။
- စမ်းသပ်မှုမစမီ Swab တုတ်တံ၊ စမ်းသပ်မှုလုပ်မည့် ကိရိယာ၊ buffer ရည်ပုလင်း၊ extraction buffer ပြွန်ချောင်းတို့ကို အရင်တုတ်ယူပါ။ စမ်းသပ်မှုလုပ်မည့် ကိရိယာကို ပိတ်ထားသော အထုပ်အတွင်းမှ ထုတ်ယူပါ။
- Buffer ရည်ပုလင်းအဖုံးကို ဖွင့်ပါ။ Buffer ရည်ပုလင်းကို ဖောက်ထိုးကိုင်ထားပြီး extraction buffer ပြွန်ချောင်း၏ Fill-line ပြည့်မှတ်အထိ ထည့်ရည်ဖြင့်ဖြည့်ပါ။
- Swab တုတ်တံကို ၎င်း၏ အထုပ်အတွင်းမှ ထုတ်ယူပါ။
- Swab တုတ်တံကို နာခေါင်းပေါက်အတွင်းသို့ အသာထိုးထည့်ပြီး နာခေါင်းအတွင်း၌ ၅ ချစ်လှည့်ပါ။
- ၎င်းတုတ်တံဖြင့် ပင်ကျွန်း နာခေါင်းပေါက်အတွင်း ထည့်ပြီး လှည့်ပါ။
- Swab တုတ်တံကို buffer ရည်ပုလင်းထဲ ထည့်ပြီး extraction buffer ပြွန်ချောင်း၏ နှိပ်စက်ပေးပါ။
- Swab အတွင်းမှ ထုတ်ယူနိုင်ရန် extraction buffer ပြွန်ချောင်းကို ညှစ်ပေးပါ။
- Swab တုတ်တံကို ချိုးရမည့်အမှတ်တွင် ချိုးပြီး ပြွန်ချောင်းအတွင်းထဲ ထည့်ပါ။ extraction buffer ပြွန်ချောင်းအဖုံးကို ပိတ်ပါ။
- ပြွန်ချောင်းဘေးကို လက်ညှိုးဖြင့် အကြိမ်အနည်းငယ် အသာခေါက်ပါ။ သို့မှသာ ပြွန်ချောင်းအတွင်းမှ အရည်တွင် သေချာစွာ ပျော်ဝင်ဖြစ်မည်။
- extraction buffer ပြွန်ချောင်း၏ ဖိပ်စက်ပေးပါ။ အဖုံးကို ဖွင့်ပါ။
- ပြွန်ချောင်းအတွင်းမှ အရည် ၅ စက်ကို စမ်းသပ်မှုကပ်ပြားပေါ်ရှိ တွင်းလေးထဲသို့ ညှစ်ချပါ။ နှုတ်သီးပါသော အဖုံးကို ပြန်ပိတ်ပါ။
- အချိန် ၁၅ မိနစ်စောင့်ပြီးမှ ကပ်ပြားပေါ်မှ အဖြေကို စစ်ပါ။ ထိုအချိန်တွင် ကပ်ပြားကို ညီညာပြေပြစ်သော မျက်နှာပြင်ပေါ်ချထားပါ။
- ကပ်ပြားပေါ်မှ အဖြေကို ဖတ်ပါ။ အကယ်၍ "C" နှင့် "T" နေရာ၌ ခုလုံးတွင် လိုင်းတစ်ခုတည်း ပေါက်သော်လည်း COVID-19 ရောဂါရှိကြောင်း ပြသသည်။ သေချာအောင် ဆက်လက်စစ်ဆေးပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် ဆေးကုသမှုချက်ချင်းခံယူပါ။
- "C" နေရာတွင်သာ လိုင်းရှိပါက အဖြေမှာ ရောဂါမရှိဖြစ်သည်။ အကယ်၍ "T" နေရာတွင်သာ လိုင်းတစ်ခုတည်း ပေါက် စမ်းသပ်မှုအဖြေမှန်ပါ။ စမ်းသပ်မှုကို အထုပ်အသစ်ဖြင့် တစ်ဖန်ပြန်လုပ်ပါ။
- Swab တုတ်တံများ၊ ဆေးရည်ပြွန်ချောင်းနှင့် စမ်းသပ်မှုလုပ်သည့် ကပ်ပြားတို့ကို အကုန်အစိုင်အရာအဖြစ် အသုံးပြုရန် အတိတ်ထဲထည့်ပါ။
- စမ်းသပ်မှုလုပ်ပြီး ပါကလက်များကို ဆေးပါ။

