


# சுயமாக-ஸ்வாப் செய்யும் வழிமுறைகள்

ஏபெட் பான்பியோ எனப்படும் ஆன்டிஜென் விரைவு பரிசோதனை செய்ய



**கீழ்க்கண்டவை ஏற்பட்டிருந்தால் ஸ்வாப் செய்வதைத் தவிர்க்கவும்:**

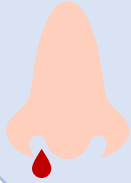

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மூக்கில் இரத்தக் கசிவு



கடந்த 4 வாரங்களில் மூக்கில் அறுவை சிகிச்சை



கடந்த 8 வாரங்களில் முகத்தில் காயம் ஏற்பட்டிருந்தால்

## ஸ்வாப் செய்வதற்கான செயல்முறை

1

பரிசோதனையைத் தொடங்கு முன் உங்கள் கைகளை சுத்தம் செய்யவும்.




2

பரிசோதனையைத் தொடங்கு முன், தயவுசெய்து ஒரு ஸ்வாப் குச்சி, ஒரு பரிசோதனை சாதனம், ஒரு பஃபர் போத்தல் மற்றும் ஒரு குழாய் ஆகியவற்றை எடுத்துக் கொள்ளவும். பரிசோதனை சாதனத்தை அதன் பொட்டலத்திலிருந்து வெளியே எடுக்கவும்.



3

பஃபர் போத்தலிலிருந்து அடைப்பு மூடியைத் திறக்கவும். போத்தலை செங்குத்தாக பிடித்து, குழாயில் பஃபர் திரவத்தை நிரப்பவும். குழாயின் நிரப்புக் கோடு அளவிற்குத் திரவத்தை நிரப்பவும்.

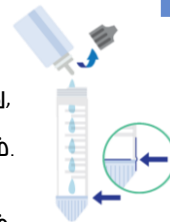

4

பொட்டலத்திலிருந்து ஸ்வாப் குச்சியை அகற்றவும்.



5

மெதுவாகச் சுழற்றிக் கொண்டே ஸ்வாப் குச்சியை மூக்கு துவாரத்தினுள் நுழைக்கவும். குச்சியை 5 முறை சுழற்றவும்.



2.0 செ.மீட்டர்

6

மற்ற மூக்கு துவாரத்திலும் அதே ஸ்வாப் குச்சியை மீண்டும் பயன்படுத்தவும்.



2.0 செ.மீட்டர்

7

குழாயின் உள் பக்கங்களில் படுமாறு பஃபர் திரவத்தில் ஸ்வாப் குச்சியின் நுனியைக் குறைந்தது 5 முறை சுழற்றவும்.




8

குழாயை அமுக்கி ஸ்வாப் குச்சியை வெளியில் எடுக்கவும்.



9

உடைப்பு முனையில் ஸ்வாப் குச்சியை உடைத்து, அதை குழாயில் விட்டுவிடவும். குழாயின் வாயை மூடி விடவும்.

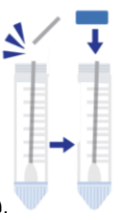


10

உங்கள் விரலால் குழாயின் பக்கத்தைச் சில முறை மெதுவாகத் தட்டவும். இது திரவத்தைக் கலக்க உதவும்.



11

குழாயின் அடிப்பகுதியில் உள்ள அடைப்பு மூடியைத் திறக்கவும்.

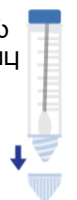

12

பரிசோதனை சாதனத்தில் உள்ள மாதிரி கலனில் 5 சொட்டு திரவத்தை இடவும். இவ்வாறு செய்தபின் குழாயை மூடியால் அடைத்து விடவும்.



13

பரிசோதனை பொதியுறையில் முடிவுகளைச் சரிபார்க்கும் முன் 15 நிமிடங்கள் காத்திருக்கவும். இவ்வேளையில் பொதியுறையை ஒரு தட்டையான மேற்பரப்பில் வைக்கவும்.



15 நிமிடங்கள்

14

பரிசோதனை பொதியுறையில் சோதனை முடிவுகளைப் பார்க்கவும். “C” மற்றும் “T” நிலை இரண்டிலும் ஒரு கோடு தோன்றுவதை நீங்கள் கண்டால், இது பாசிடீவ், அதாவது, நேர்மறையான சோதனை முடிவைக் குறிக்கிறது. இப்பரிசோதனை முடிவை மேலும் மதிப்பீடு செய்வதற்கும், அதனை உறுதிப்படுத்தும் பரிசோதனை செய்வதற்கும் தயவுசெய்து மருத்துவ உதவியை நாடவும்.

“C” நிலையில் மட்டுமே ஒரு கோடு தோன்றுவதைக் கண்டால், இது எதிர்மறையான, அதாவது, நெகடிவ் முடிவைக் குறிக்கிறது.

“T” நிலையில் மட்டும் ஒரு கோடு தோன்றுவதை நீங்கள் கண்டால், பரிசோதனை செல்லுபடி ஆகாது. மற்றொரு சோதனை கருவியைப் பயன்படுத்தி பரிசோதனையை மீண்டும் செய்யவும்.

15

பயன்படுத்தப்பட்ட அனைத்து ஸ்வாப் குச்சிகள், குழாய் மற்றும் சோதனை பொதியுறையை பயோஹசார்ட் பையில் அப்புறப்படுத்தவும்.



16


பரிசோதனைக் குப் பிறகு உங்கள் கைகளை சுத்தம் செய்யவும்.



நேர்மறை

எதிர்மறை

செல்லுபடியில்லை

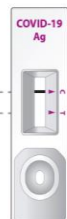

“C” Control Line  
“T” Test Line