


சுய-ஸ்வாப் செய்வதற்கான வழிமுறைகள்

QUIDEL QUICKVUE என்கிஜன் விரைவு பரிசோதனைக்கு



இக் காரணங்களுக்காகப் பரிசோதனையை மேற்கொள்ள வேண்டாம்:

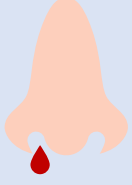

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மூக்கில் இரத்தக் கசிவு



கடந்த 4 வாரங்களில் மூக்கில் அறுவை சிகிச்சை



கடந்த 8 வாரங்களில் முகத்தில் காயம் ஏற்பட்டிருந்தால்

ஸ்வாப் செய்வதற்கான செயல்முறை


1

பரிசோதனையைத் தொடங்குமுன் உங்கள் கைகளை சுத்தம் செய்யவும்.



2

ஏற்கனவே திரவம் நிரப்பப்பட்ட ஒரு குழாயிலிருந்து அதன் மூடியை அகற்றவும். குழாயை அதன் பிடிமானத்தில் மீண்டும் வைக்கவும்.

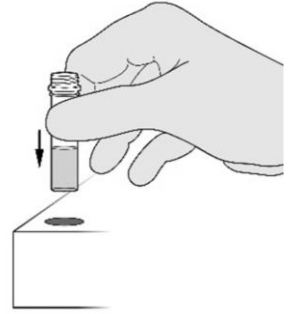

3


மூக்கு ஸ்வாப் குச்சியைச் சுற்றியிருக்கும் தாளை உரித்து எடுக்கவும்.

ஸ்வாப் குச்சியின் நுனியைத் தொட வேண்டாம்




4

மூக்கு துவாரத்துக்குள் ஸ்வாப் குச்சியை நுழைக்கவும் (சுமார் 1.5cm முதல் 2cm வரை). மூக்கு துவாரம் ஒவ்வொன்றின் உட்புறச் சுவரைச் சுற்றிலும் ஸ்வாப் குச்சியைக் குறைந்தது 4 முறை தேய்க்கவும். மாதிரியைச் சேகரிக்க 15 வினாடிகள் எடுத்துக் கொள்ளவும்.

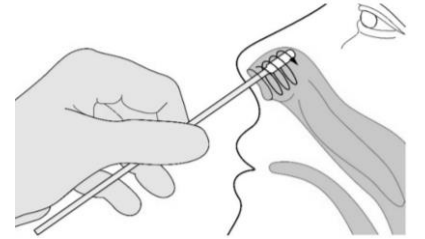


5

திறந்திருக்கும் திரவம் நிரப்பப்பட்ட குழாயில் உடனடியாக ஸ்வாப் குச்சியை நுழைக்கவும். குழாயின் அடிப்பகுதியைக் குச்சி தொட வேண்டும். 3 அல்லது 4 முறை குச்சியைச் சுழற்றவும்.

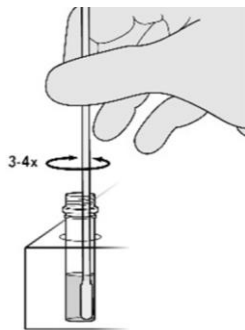

6


குறைந்தது ஒரு நிமிடம் ஸ்வாப் குச்சியைக் குழாயில் அப்படியே விட்டு விடவும்.

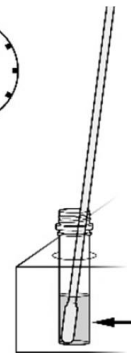

குறைந்தது 1 நிமிடத்திற்கு ஸ்வாப் குச்சியை உள்ளே விட்டு விடவும்!

7

ஸ்வாப் குச்சியை வெளியில் எடுக்கும்போது, குச்சியின் நுனியை குழாயின் சுவற்றில் முடிந்தவரை தேய்க்கவும். அப்போதுதான் அதிகமான திரவம் வெளியாகும். ஸ்வாப் குச்சியின் நுனியைத் தொட வேண்டாம். ஸ்வாப் குச்சியைப் பயோஹசார்ட் பையில் அப்புறப்படுத்தவும்.

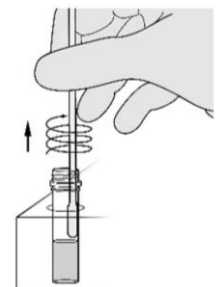

சுய-ஸ்வாப் செய்வதற்கான வழிமுறைகள்


QUIDEL QUICKVUE என்டிஜன் விரைவு பரிசோதனைக்கு

ஸ்வாப் செய்வதற்கான செயல்முறை

8

பரிசோதனை துண்டு உள்ள பையைக் கோடிட்ட இடத்தில் கிழிக்கவும். பரிசோதனை துண்டைக் கவனமாக வெளியில் எடுக்கவும். அதன் மேற்பகுதியை மட்டும் பிடிக்கவும்.

இங்கே கிழிக்கவும்

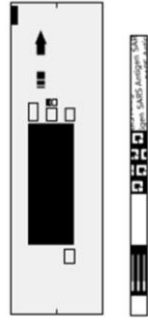

இங்கே பிடித்துக் கொள்ளவும்


9

திறந்திருக்கும் திரவம் நிரப்பப்பட்ட குழாயில் பரிசோதனை துண்டை நுழைக்கவும். பரிசோதனை துண்டில் காணப்படும் அம்பு குறிகள் கீழ் நோக்கி இருக்க வேண்டும்.

10

பரிசோதனைத் துண்டில் முடிவுகளை சரிபார்க்கும் முன் 10 நிமிடங்கள் காத்திருக்கவும்.

சோதனைத் துண்டை குறைந்தது 10 நிமிடங்களுக்கு உள்ளே விட்டு விடவும்!

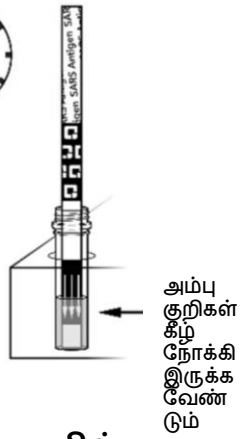


அம்பு குறிகள் கீழ் நோக்கி இருக்க வேண்டும்

11

குழாயிலிருந்து பரிசோதனைத் துண்டை அகற்றியவுடன் 5 நிமிடங்களுக்குள் அதில் தோன்றும் முடிவைப் படிக்க வேண்டும். தவறான முடிவுகளைத் தவிர்க்க இது உதவும். இவ்வேளையில் பரிசோதனை துண்டை ஒரு தட்டையான மேற்பரப்பில் வைக்கவும்.


நேர்மறையான (பாசிடிவ்) முடிவு

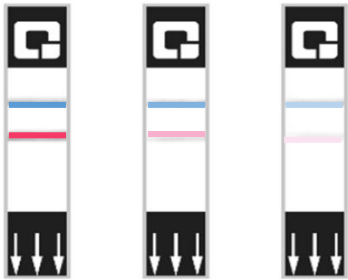

எதிர்மறை (நெகடிவ்) முடிவு



முடிவு செல்லுபடியாகாது

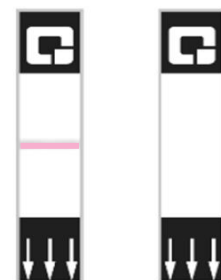

• இளஞ்சிவப்பு - சிவப்பு நிறத்தில் பரிசோதனைக் கோடு மற்றும் நீல நிறத்தில் கட்டுப்பாட்டுக் கோடு தோன்றினால், இது நேர்மறையான பரிசோதனை முடிவைக் குறிக்கும்.

• நீல நிற கட்டுப்பாட்டுக் கோடு மட்டும் தோன்றினால், இது எதிர்மறையான பரிசோதனை முடிவைக் குறிக்கும்

• இளஞ்சிவப்பு - சிவப்பு பரிசோதனைக் கோடு தோன்றினாலும் கூட, நீல நிற பரிசோதனைக் கோடு தோன்றாமல் இருக்கலாம். மற்றும் பின்னணி நிறம் தெளிவாக இல்லாமல், பரிசோதனையின் முடிவை வாசிப்பதில் இடையூறாக இருக்கலாம். அப்படி என்றால் பரிசோதனையின் முடிவு செல்லுபடியாகாது. மற்றொரு பரிசோதனைக் கருவியைக் கொண்டு பரிசோதனையை மீண்டும் செய்யவும்.



நேர்மறை முடிவு அல்லது செல்லுபடியாகாத முடிவு இரண்டு முறை ஏற்பட்டால், இப்பரிசோதனை முடிவை மேலும் மதிப்பீடு செய்வதற்கும், அதனை உறுதிப்படுத்தும் பரிசோதனை செய்வதற்கும் தயவுசெய்து மருத்துவ உதவியை நாடவும்.

12

பரிசோதனைக்குப் பிறகு உங்கள் கைகளை சுத்தம் செய்யவும்.

