

MGA TAGUBILIN SA PAG-SWAB SA SARILI

PARA SA ANTIGEN RAPID TEST NG SD BIOSENSOR



HUWAG MAGPATULOY KUNG:



Nakaranas ka ng pagdurugo ng ilong sa loob ng nakalipas na **24 na oras**



Sumailalim ka sa operasyon sa ilong sa nakalipas na **4 na linggo**



Nagtamo ka ng pinsala sa mukha sa nakalipas na **8 linggo**

PAMAMARAAN NG PAG-SWAB

1 Pakilinis ang iyong mga kamay bago simulan ang pagsusuri.



2 Bago simulan ang pagsusuri, maglabas ng isang swab stick, isang test device, isang selyadong extraction buffer tube, at isang nozzle cap. Ilabas ang test device sa pakete nito.




3 Alisin ang swab stick sa pakete.




4 Ipasok ang swab stick sa butas ng ilong (~2cm) habang dahan-dahan itong iniikot. likot ang stick nang 10 na beses habang nasa loob ito ng butas ng ilong.



5 Ulitin ito para sa isa pang butas ng ilong gamit ang parehong swab.

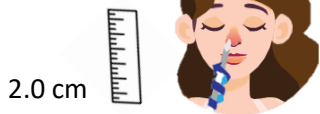

6 Alisin ang selyo sa extraction buffer tube at ipasok ang swab sa extraction buffer tube upang maihalo. Habang pinipisil ang buffer tube, ihalo ang swab nang 10 beses.

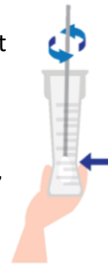

7 Pisilin ang reagent tube habang tinatanggal ang swab.




8 Itakip nang mahigpit ang nozzle cap sa tube.



9 Gamitin ang iyong daliri upang dahan-dahang tapikin ang gilid ng tube nang ilang beses. Makakatulong itong haluin ang solution.




10 Maglagay ng 4 na patak sa sample well ng test cartridge.

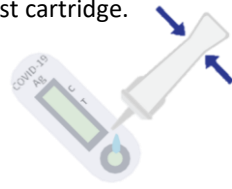

11 Maghintay nang 15 minuto bago tingnan ang mga resulta sa test cartridge. Ilagay ang cartridge sa patag na lugar habang ginagawa ito.

15 min

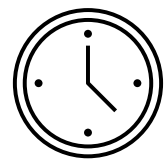

12 Basahin ang mga resulta sa test cartridge. **Kung may makikita kang linya na lumalabas sa "C" at "T" na posisyon, nagsasaad ito ng positibong pagsusuri. Humingi ng medikal na pangangalaga para sa karagdagang pagsusuri at pangkumpirmang pagsusuri.**

Kung may makikita kang linya na lumalabas lang sa "C" na posisyon, nagsasaad ito ng negatibong pagsusuri. **Kung may makikita kang linya na lumalabas lang sa "T" na posisyon,** invalid ang pagsusuri. Pakiulit ang pagsusuri sa isa pang test kit.

13 Itapon ang lahat ng nagamit na swab stick, reagent tube, at test cartridge sa biohazard bag.




14 Linisin ang iyong mga kamay pagkatapos ng pagsusuri.




POSITIBO



NEGATIBO

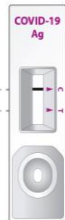

INVALID

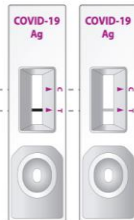

C Control Line
T Test Line